

COMMENT RECUEILLIR ET ENVOYER LES ÉCHANTILLONS DE SANG



- 1- Préparer 1 tube « STRECK » (étiquetage)
- 2- Prélever 1 x 10 ml de sang total. Le tube doit être totalement rempli. **Attention remplissage LENT.**
- 3- **NE PAS CENTRIFUGER** mais opérer au moins 10 retournements doux du tube.



- 4- Déposer le tube dans la pochette plastique fournie avec le package DPNI
- 5- Conserver le sachet contenant le tube entre + 15° C et + 30° C.
Le transport se fera à température ambiante.
L'ECHANTILLON DOIT PARVENIR AU LABORATOIRE ALPIGENE SOUS 96H (4 jours).
- 6- **NE PAS CONGELER**
- 7- Joindre impérativement les documents suivants à votre envoi :
 - La feuille de demande d'examen
 - Le formulaire d'attestation d'information de la patiente et le formulaire de recueil du consentement, **signés** par le médecin et la patiente
 - La copie du compte-rendu de l'échographie du 1^{er} trimestre
 - Les différents documents requis selon l'indication
 - Les résultats des marqueurs maternels sériques de la trisomie 21. En l'absence de réalisation, faire signer l'attestation de refus à la patiente lors du prélèvement.

Conservation des tubes STRECK avant utilisation :

- ▶ A température ambiante jusqu'à date de péremption inscrite sur le tube
- ▶ Ne pas congeler les tubes

POUR TOUTE QUESTION, N'HÉSITEZ PAS À VOUS ADRESSER À VOTRE BIOLOGISTE RÉFÉRENT DPNI.

Centre de génétique médicale ALPIGENE

8, Rue Saint Jean de Dieu

69007 Lyon

Tél : 04.78.76.62.39 / Fax : 04 78 77 59 62

MT-ALP-PRE-002-06 Applicable le 15/07/2020